




27英寸全高清宽屏手术监视器，可完整再现手术影像。

高清手术监视器

该监视器采用具有节能LED背光的LCD面板，亮度高达900 cd/m²。它以全高清分辨率（1920×1080像素）显示，并可完整再现用于内窥镜检查 and 显微镜操作的高清手术影像。

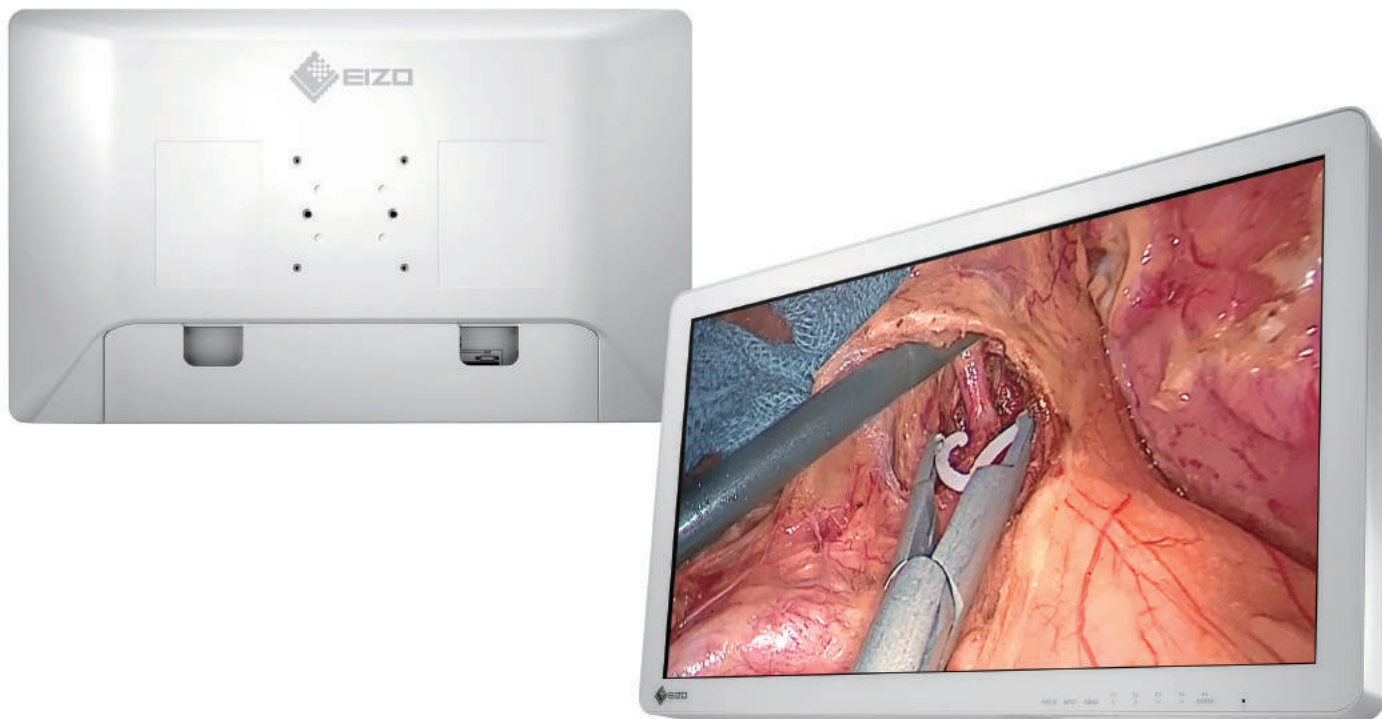

全扁平化设计，利于安全和卫生

手术室包含各种医疗器械，这些设备都是根据正在进行的手术类型进行排列的。出于安全考虑，EIZO的手术监视器采用圆角设计。监视器正面覆盖一层完全平坦的防尘防水保护玻璃（正面防护等级：IP45，整体防护等级：IP32）。通过附加的电缆盖，电缆能够整齐地存放于视线之外的地方，从而提高安全性和卫生性。



CuratOR® EX2721

防护玻璃

显示器配有硬度为9H的防护玻璃，可防止灰尘和冲击。

干净且安静的无风扇设计

该监视器采用卓越的散热技术，使得其无需风扇即可保持冷却。如此使监视器显得极安静，不会扰乱手术室的气流。此外，由于不存在通风孔，清洁起来轻而易举，因此能够轻松地对监视器进行手术消毒。

180° 旋转或镜像功能

无论手术摄像头的方向如何，您都可以将显示的图像旋转180°或镜像以找到完美的手术视图。适用于使图像与周围助手和外科医生的站点线相匹配，从而提高手术室的便利性。

可在一个屏幕上查看多个信号

可通过使用PoP（画外画）功能在一个监视器屏幕上同时查看两个单独的信号源。另外，可通过使用PiP（画中画）在主信号监视器上方的角落中显示第二个信号。使用PoP或PiP时，两个监视器的大小和位置均可调整。该功能在需要同时查看若干图像（如多个模式）时非常有用。

能够独立地调整屏幕

在同一屏幕上并排显示两个信号源时，能够在不干扰其他图像的情况下调整每个图像的显示模式（伽玛值1.8-2.6或DICOM预设模式）。这对多模式用途而言是完美的选择，其中内窥镜、CT和MRI图像能够准确地显示在同一监视器上。

独立旋转和镜像

当同时显示两个信号时，每个图像均可独立地旋转180度或镜像。

支持各种输入/输出信号

监视器支持各种视频输入/输出信号，可连接至各类模式设备。此外，GPI和RS-232C允许您从外部控制输入信号和屏幕旋转，以便结合所用手术设备的设置更改图像的显示。


具有医疗资格，请放心使用

为了实现可在任何医疗机构放心使用的安全可靠的监视器，EIZO通过了各种医疗标准和安全/ EMC标准。本监视器符合最新的IEC 60601-1-2第4版标准。


规格

面板	类型	彩色 (IPS)
	背光	LED
	尺寸	68.6 cm / 27.0"
	分辨率	1920 x 1080 (长宽比16:9)
	显示尺寸(H x V)	598 x 336 mm
	像素间距	0.311 x 0.311 mm
	显示色彩	10位色彩 (SDI): 10.7亿 (最大) 种颜色 8位色彩: 1677 万种颜色
	可视角度(H / V, 标准)	178° / 178°
	亮度 (标准)	900 cd/m²
	对比度 (标准)	1000:1
视频信号	响应时间 (标准)	14 ms (on / off)
	输入端子	BNC (3G-SDI), DVI-D x 2 (HDCP 1.4), D-Sub 15 针 (微型), S-Video, BNC (复合型)
	输出端口	BNC (3G-SDI), DVI-D, S-Video, BNC (复合型)
	数字扫描频率 (H / V)	15 - 75 kHz / 24 - 60 Hz
	模拟扫描频率 (H / V)	15 - 80 kHz / 24 - 85 Hz
功率	同步格式	独立、复合、绿色同步
	电源要求	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
特征和功能	最大功率	79 W
	遥控 (RS-232C, GPI)	
物理规格	净重 (不包括底座)	8.5 kg
	安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm, M4, 深度 5 - 9 mm
环境要求	防护等级	IP45 (正面), IP32 (背面)
认证与标准	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES-3(A), RCM, RoHS, 中国 RoHS, WEEE, CCC, EAC, BIS	
FDA	I类	
随附提供的配件	AC 电源线、AC 适配器、电缆、光盘 (PDF 安装手册、使用说明)	
质保	(可能因国家而异。详情请联系 EIZO)	
质保		两年

尺寸 (单位: mm)

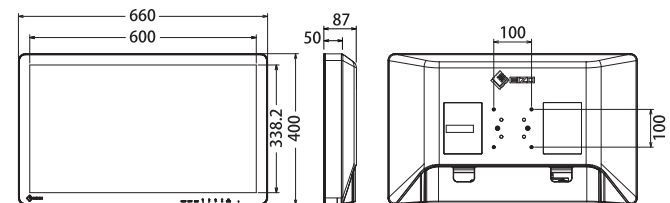

接口

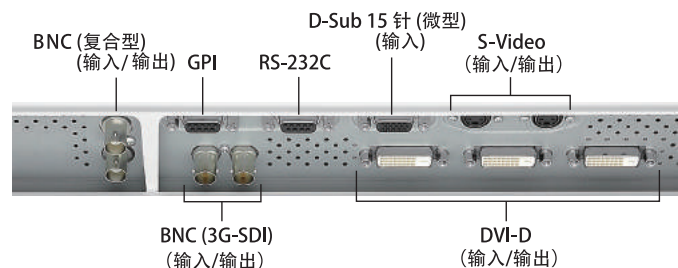

所有产品名称均为其各自所属公司的商标或注册商标。EIZO、EIZO标志和CuratOR均属于EIZO Corporation的注册商标。DICOM是美国国家电气制造商协会的注册商标，用于其与医疗数字通信相关的标准出版物信息。屏幕图像由静冈癌症中心提供。规格可能会不时变更，恕不另行通知。