

Manuel d'installation

CuratOR[®]
EX2721

Moniteur couleur LCD

Important

Veillez lire attentivement ce Manuel d'installation ainsi que le « Notice d'instruction » (tome séparé) afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité.

Reportez-vous à la Notice d'instruction pour obtenir plus d'informations sur l'installation et/ou le branchement du moniteur.



Ce produit a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d'abord été livré. Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.

EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

CONTENUS

CONTENUS	3
Chapitre 1 Ajustement / réglage de base.....	4
1-1. Chargement des réglages de l'écran.....	4
1-2. Commutation des signaux d'entrée	5
1-3. Utilisation des boutons de fonction	6
Chapitre 2 Ajustements / réglages avancés.....	7
2-1. Utilisation via le menu principal	7
2-2. Fonctions du menu principal	8
● Config. entrée.....	8
● Config. vidéo	10
● Config. syst.....	11
● Fonction.....	13
● Config. fenêt.....	14
● Distant	16
● Contrôle.....	18
Chapitre 3 Dépannage	19
3-1. Aucune image affichée.....	19
3-2. Problèmes d'image	20
3-3. Autres problèmes	20
Chapitre 4 Référence	21
4-1. Principaux réglages par défaut.....	21
4-2. Spécifications des broches	22
Annexe	23
GARANTIE LIMITÉE	23
Marque commerciale	24
Licence	24

Chapitre 1 Ajustement / réglage de base

Ce chapitre décrit les fonctionnalités de base qui peuvent être réglées et configurées à l'aide des boutons à l'avant du moniteur.


1-1. Chargement des réglages de l'écran

Il est possible de commuter les réglages PRESET, USINE ou UTIL qui ont été définis à l'avance.

PRESET	Les réglages de base sont définis en usine à l'avance. Les réglages de PRESET ne peuvent pas être modifiés.
USINE	Retourne aux réglages lorsqu'ils sont expédiés de l'usine.
UTIL	Divers réglages, y compris les menus, peuvent être définis pour un usage personnel. Pour plus de détails, « Preset » (page 11).

1. Appuyez sur (PRESET).

Le menu des préréglages s'affiche.

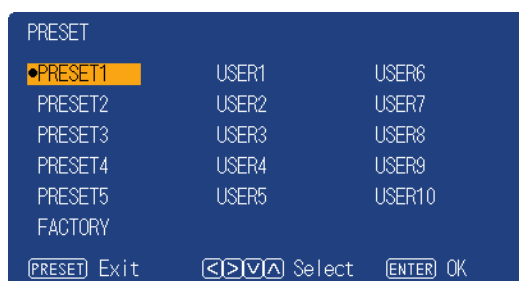


2. Appuyez sur pour sélectionner le numéro de PRESET, USINE ou le numéro d'UTIL à charger, puis sur (ENTER).

Les réglages prédéfinis sont chargés et les réglages sont modifiés. Les réglages sélectionnables sont les suivants.

- PRESET1 à PRESET5
- USINE
- UTIL1 à UTIL10

Remarque


- Le menu « PRESET » disparaît au bout de cinq secondes si aucune opération n'est effectuée.
-  S'affiche pour le numéro d'UTILISATEUR qui a déjà été enregistré.
- Lors de la sélection d'un numéro d'UTILISATEUR qui n'a pas encore été enregistré, « Aucune donnée » s'affiche.
- Pour obtenir plus de détails concernant les principaux réglages par défaut, consultez « [4-1. Principaux réglages par défaut](#) » (page 21).

1-2. Commutation des signaux d'entrée

Sélectionnez l'entrée de signal du moniteur et affichez-la à l'écran.

1. Appuyez sur (INPUT).

Le menu « Sélect. entrée » s'affiche.

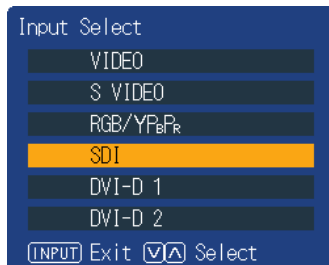


2. Appuyez sur pour sélectionner un signal d'entrée.

Cela permet de passer au signal d'entrée sélectionné.

3. Appuyez sur (INPUT).

L'écran du menu s'ouvre.

Remarque


- Si vous appuyez sur  (ENTRÉE) lorsque le menu « Sélect. entrée » est affiché en mode double écran, le menu « Sélect. entrée » de l'écran secondaire est affiché.
 - Lorsque RGB / YPBPR est sélectionné, si la couleur est anormale, réglez-la correctement à l'aide de « [Config. entrée](#) » (page 8) dans le menu principal.
 - Le menu « Sélect. entrée » disparaît au bout de cinq secondes si aucune opération n'est effectuée.
-

1-3. Utilisation des boutons de fonction

Exécutez les fonctions attribuées aux boutons de fonction (F1 (◀), F2 (▶), F3 (▼) F4 (▲) et F5 (↻)). Pour plus d'informations sur la définition d'une fonction sur chaque bouton, voir « [Fonction](#) » (page 13).

1. Appuyez sur F1 (◀), F2 (▶), F3 (▼) F4 (▲) ou F5 (↻).


Le menu des fonctions s'affiche.

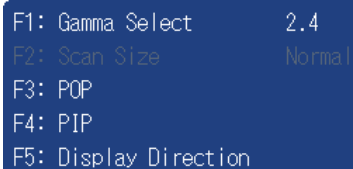

F1: Gamma Select	2.4
F2: Scan Size	Normal
F3: POP	
F4: PIP	
F5: Display Direction	

2. Appuyez sur le bouton ayant la fonction cible définie lorsque le menu des fonctions est affiché.

Remarque


- En mode double écran, appuyez sur  (INPUT) pour sélectionner un écran et exécuter la fonction cible.
- Lorsque le réglage de « [Aff. Fonction](#) » (page 13) est « Non », le message « FONCTION INVALIDE » s'affiche si vous appuyez sur un bouton de fonction qui ne peut pas fonctionner.
- Lorsque le réglage de « [Aff. Fonction](#) » (page 13) est « Non », le message « NON DÉFINI » s'affiche si vous appuyez sur un bouton de fonction attribué à « Non déf. »


Chapitre 2 Ajustements / réglages avancés

Ce chapitre décrit les ajustements avancés de l'écran et les procédures de réglage en utilisant le menu principal.

2-1. Utilisation via le menu principal





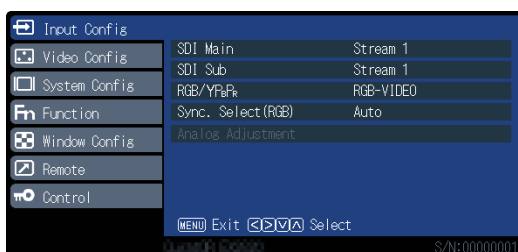

1. Affichage du menu

1. Appuyez sur  (MENU).
Le menu principal s'affiche.



2. Appuyez sur   pour sélectionner l'élément souhaité, puis sur  .

2. Ajustements / réglages

1. Appuyez sur   pour sélectionner l'élément désiré.
2. Appuyez sur   pour effectuer un réglage.
Si « Menu suivant » s'affiche pour un élément, appuyez sur   pour afficher l'élément suivant.



3. Sortie

1. Appuyez à plusieurs reprises sur  (MENU) pour quitter l'écran de menu.

2-2. Fonctions du menu principal

● Config. entrée

Réglage de chaque connecteur d'entrée.



Fonction	Plage de réglage	Description
SDI Principal	Canal 1 Canal 2	Règle l'image sur l'écran principal pour le signal SDI à double flux. Ceci s'applique également à l'affichage sur écran simple.
SDI Secondaire	Canal 1 Canal 2	Règle l'image sur l'écran secondaire pour le signal SDI à double flux.
RGB / YP _B P _R	YP _B P _R RGB-VIDEO RGB-PC	Réglez selon le signal connecté aux connecteurs d'entrée Y/G ou P _B /B, P _R /R. <ul style="list-style-type: none"> « YP_BP_R » Réglez sur le signal Y, P_B/C_B ou P_R/C_R. « RGB-VIDEO » Règle sur les signaux RVB. La décision du signal donne la priorité au système VIDEO. « RGB-PC » Règle sur les signaux RVB. La décision du signal donne la priorité au système PC.
Sélect. sync (RGB)	Auto Sync. sur le vert VBS	Règle la méthode de synchronisation d'entrée du signal pour les connecteurs d'entrée RGB. <ul style="list-style-type: none"> « Auto » Permet de basculer automatiquement entre l'entrée SYNC et SYNC sur G. Lorsque l'entrée SYNC et SYNC sur G ont été réglées, l'entrée SYNC est prioritaire. « Sync. sur le vert » Lorsque l'entrée SYNC et l'entrée SYNC sur G sont synchrones, sélectionnez cette option pour synchroniser avec SYNC sur G. « VBS » Sélectionnez cette option lors de la connexion en synchronisation avec le signal composite du connecteur d'entrée (VBS). Par exemple, lorsqu'un signal d'image R/G/B non synchrone et un périphérique de sortie de signal VBS sont connectés au moniteur, connectez le signal VBS au connecteur d'entrée SYNC et sélectionnez VBS.

Fonction		Plage de réglage	Description
Ajustement analog.	Paramétrage auto	-	Règle automatique la « Position H », la « Position V » et l'« Horloge à points » lorsque le signal PC est l'entrée.
	Position H	0 à 300	Pour déplacer l'écran à gauche et à droite.
	Position V	0 à 100	Pour déplacer l'écran vers le haut et vers le bas.
	Horloge à points	0 à 100	Quand des rayures s'affichent, ajustez-le de manière à ce que le bruit diminue lorsque les rayures synchrones (bruit) sont produites.
	Phase horloge	0 à 31	Lorsque vous envoyez des signaux RGB et des signaux PC, ajustez afin de faciliter la visualisation en cas de débordement ou de flou du contour de l'écran.
	Format du signal	4:3 Large	Définit le type de signal pour les signaux non identifiables.

● Config. vidéo


Ajustements / réglages de l'affichage d'image.



Fonction	Plage de réglage	Description
Couleur	0 à 100	Règle la profondeur des couleurs de l'image.
Nuance	0 à 100	Règle la couleur de peau.
Luminosité	0 à 100	Règle les zones foncées (noires) de l'image.
Image	0 à 100	Règle le contraste de l'image.
Netteté	0 à 20	Règle la définition des couleurs du contour de l'image.
Gamma	1,8 à 2,6 DICOM	Règle la variation de luminosité.
Rétroéclairage	0 à 100	Règle la luminosité du rétroéclairage. Dans le cas de plusieurs écrans, sélectionnez l'écran principal. Ce réglage ne peut pas être modifié lorsqu'un écran autre que l'écran principal est sélectionné.
Temp. couleur	6500 K 9300 K Non	Commute les nuances de l'image.
Gain R	0 à 100	Règle l'intensité du rouge dans les parties claires.
Gain G	0 à 100	Règle l'intensité du vert dans les parties claires.
Gain B	0 à 100	Règle l'intensité du bleu dans les parties claires.
Décalage R	0 à 100	Règle l'intensité du rouge dans les parties sombres.
Décalage G	0 à 100	Règle l'intensité du vert dans les parties sombres.
Décalage B	0 à 100	Règle l'intensité du bleu dans les parties sombres.
Gamme de couleurs	sRGB Natif	Définit la plage de reproduction de couleurs. <ul style="list-style-type: none"> « sRGB » Affiche la gamme de couleurs définie par sRGB. « Natif » Affiche la gamme de couleurs du panneau.
Plage d'entrée	0-255 16-235	La plage de gradation disponible est modulée en fonction des signaux d'entrée du connecteur DVI-D. <ul style="list-style-type: none"> « 0-255 » Utilisez ce réglage lorsque vous connectez la source de format PC. « 16-235 » Utilisez ce réglage lorsque vous connectez la source de format vidéo.
Paramétrage NTSC	0 7,5	Sélectionnez le niveau de réglage pour les signaux NTSC. Notez que le niveau standard pour les signaux NTSC varie d'un pays à l'autre. <ul style="list-style-type: none"> « 0 » Réglez cela lorsque les zones sombres de l'écran sont trop sombres. (0 IRE) « 7,5 » Réglez cela lorsque les zones sombres de l'écran sont trop claires. (7,5 IRE)
Réduction du bruit	Non Eclairage Moyen Fort	Sélectionnez le niveau de réduction du bruit sur l'image.

● Config. syst.

Réglages des périphériques.

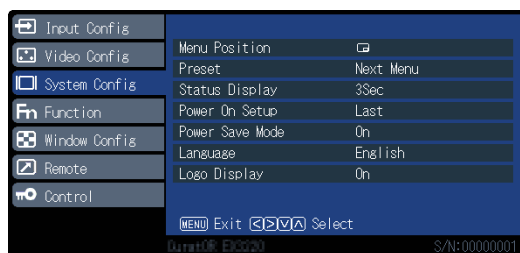


Fonction		Plage de réglage	Description
Position du menu		 	<p>Les emplacements d'affichage de l'écran du menu, de l'écran Sélect. entrée et de l'écran du menu PRESET sont définis ici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • « » Les écrans s'affichent au centre du panneau. • « » Les écrans s'affichent dans le coin supérieur droit du panneau. • « » Les écrans s'affichent dans le coin inférieur droit du panneau. • « » Les écrans s'affichent dans le coin inférieur gauche du panneau. • « » Les écrans s'affichent dans le coin supérieur gauche du panneau.
Preset	Enregistrer	-	<p>Enregistre les valeurs de réglage actuelles et l'état d'affichage de chaque utilisateur.</p> <p>Attention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les réglages « Paramétrage alim. », « Langue » et « Affichage logo » ne peuvent pas être enregistrés.
	Supprimer	-	Les valeurs définies de « UTIL1 » à « UTIL10 » (NOM UTIL) peuvent être supprimées.
	Renommer	-	Les chaînes de caractères de « UTIL1 » à « UTIL10 » (NOM UTIL) peuvent être modifiées.
Affichage état		Continu 3 s Non	<p>Définit si les informations concernant le signal d'entrée actuel et le nom du connecteur sont affichées.</p> <p>Les informations sur la résolution à l'entrée du signal PC sont également affichées.</p>
Paramétrage alim.		Dernier PRESET1 à PRESET5 USINE UTIL1 à UTIL10	<p>Les paramètres d'alimentation peuvent être réglés à l'avance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Dernier » Démarré avec le dernier état enregistré. • « PRESET1 » à « PRESET5 » Démarré avec l'état enregistré dans PRESET. Cinq types de réglages PRESET sont enregistrés à l'avance dans le moniteur sous forme de données fixes. • « USINE » Restaure les paramètres d'usine. • « UTIL1 » à « UTIL10 » Démarré avec l'état enregistré dans UTIL. Il est possible d'enregistrer 10 types de données pour chaque UTIL.

Fonction	Plage de réglage	Description
Économie d' énergie	Oui Non	Définit si le rétroéclairage s'arrête après 30 secondes sans aucun signal vidéo.
Langue	Anglais Allemand Français Japonais Chinois simplifié Italiano Espagnol Suédois Chinois traditionnel	Définit la langue à utiliser pour l'affichage dans les paramètres et tous les menus.
Affichage logo	Oui Non	Définit la présence ou l'absence de l'affichage logo au démarrage.

● Fonction

Réglez les fonctions attribuées aux boutons de fonction (F1 (◀), F2 (▶), F3 (▼), F4 (▲) et F5 (↻)), et définissez les conditions d'exécution.

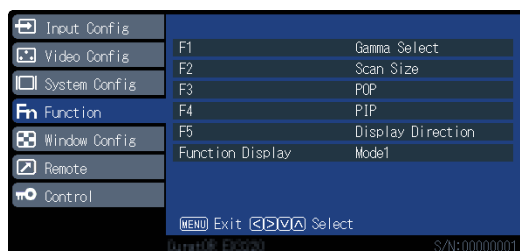

F1 / F2 / F3 / F4 / F5

Définit les fonctions attribuées aux boutons de fonction.


Réglage	Description
PIP	Permet de basculer entre le double écran (P in P : un petit écran s'affiche sur un écran normal) et l'affichage sur écran simple.
Orientation	Pivote ou renverse l'écran.
Taillebalayage	Change successivement entre les valeurs de réglage de « Config. fenêt. » - « Taillebalayage ».
Sélect. Gamma	Change successivement les valeurs de réglage de « Config. vidéo » - « Gamma ».
Non déf.	Aucune fonction attribuée.
Mode fenêt.	Change successivement les valeurs de réglages de « Mode fenêt. » pour le double écran actuellement affiché.
Paramétrage auto	Exécute « Config. entrée » - « Ajustement analog. » - « Paramétrage auto ».
Entrée VIDEO	Passe à l'entrée désirée.
Entrée S VIDEO	
Entrée RGB/YP _B P _R	
Entrée SDI	
Entrée DVI-D 1	
Entrée DVI-D 2	
Réduction du bruit	Change successivement entre les valeurs de réglage de « Config. vidéo » et « Réduction du bruit ».
POP	Change entre le double écran (P out P : l'écran se divise horizontalement) et l'affichage simple écran.
Gamme de couleurs	Module la plage de reproduction de couleurs.

Aff. Fonction

Réglage	Description
Mode1	Si vous appuyez à nouveau sur le bouton de fonction après l'affichage du menu des fonctions, la fonction est exécutée.
Mode2	Le menu des fonctions s'affiche et la fonction est exécutée.
Non	Exécute la fonction sans afficher le menu des fonctions.

● Config. fenêt.

Réglages de l'affichage d'écran.

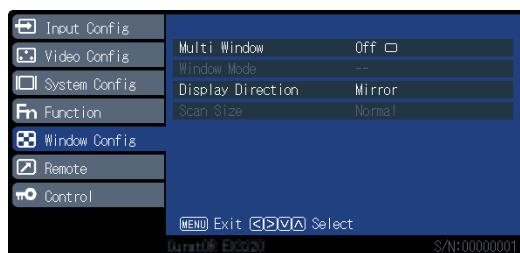

Fonction	Plage de réglage	Description
Multi-fenêtres	Non <input type="checkbox"/> 2PIP <input type="checkbox"/> 2POP <input type="checkbox"/>	Définit l'affichage à double écran. <ul style="list-style-type: none"> « Non <input type="checkbox"/> » Définit l'affichage à écran simple. « 2PIP <input type="checkbox"/> » Affiche un petit écran (écran secondaire) sur un écran normal (P in P). « 2POP <input type="checkbox"/> » Affiche un écran divisé (P out P).
Mode fenêt.	(Lorsque « 2PIP » est sélectionné) Mode1 <input type="checkbox"/> Mode2 <input type="checkbox"/> Mode3 <input type="checkbox"/> Mode4 <input type="checkbox"/> ----- (Lorsque « 2POP » est sélectionné) Mode1 <input type="checkbox"/> Mode2 <input type="checkbox"/> Mode3 <input type="checkbox"/>	Sélectionne la position et la taille d'affichage de l'écran secondaire pour les modes respectifs selon le mode Multi-fenêtres. (Lorsque « 2PIP » est sélectionné) <ul style="list-style-type: none"> « Mode1 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire en haut à droite. « Mode2 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire en bas à droite. « Mode3 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire en bas à gauche. « Mode4 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire en haut à gauche. (Lorsque « 2POP » est sélectionné) <ul style="list-style-type: none"> « Mode1 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire d'1/2 de taille d'affichage. « Mode2 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire d'1/3 de taille d'affichage. « Mode3 <input type="checkbox"/> » Affiche un écran secondaire d'1/4 de taille d'affichage.
Orientation	Normal 180° Miroir	Définit l'angle de rotation ou le retournement horizontal de l'écran principal et de l'écran secondaire.


Fonction	Plage de réglage	Description
Taillebalayage	Normal x1.05 x1.10 x1.33 x1.50 16:9 Directe 4:3 1:1 V Fit	<p>Définit les rapports de zoom avant / arrière lors de l'affichage d'une vidéo en entrée sur l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Normal » Lors de l'utilisation de l'écran simple, agrandi ou réduit de sorte que la résolution verticale est de 1080 points. Des bandes sombres se forment à gauche et à droite lorsque le rapport d'aspect est autre que 16:9. Lors de l'utilisation de plusieurs fenêtres, elles s'affichent de manière à correspondre à l'écran principal et à l'écran secondaire. • « x1.05 » Agrandit les images affichées avec « Normal » de 1,05 fois. • « x1.10 » Agrandit les images affichées avec « Normal » de 1,1 fois. • « x1.33 » Agrandit les images affichées avec « Normal » de 1,33 fois. • « x1.50 » Agrandit les images affichées avec « Normal » de 1,50 fois. • « 16:9 » Affiche le rapport d'aspect converti des images affichées avec « Normal » à 16:9. • « Directe » Les signaux avec résolutions verticales de 720 points ou plus sont affichés sans appliquer le processus de mise à l'échelle (agrandissement / réduction). • « 4:3 » Extrait le signal d'entrée de manière à ce que le rapport d'aspect soit de 4:3 et s'adapte au cadre d'affichage. • « 1:1 » Extrait le signal d'entrée de manière à ce que le rapport d'aspect soit de 1:1 et s'adapte au cadre d'affichage. • « V Fit » Extrait et affiche le signal d'entrée de manière à ce qu'il corresponde au cadre d'affichage vertical du POP.

Remarques

- « Normal » s'affiche en 4:3 lorsque le signal d'entrée est NTSC, PAL, 480 / 60i, 480 / 60p, 576 / 50i ou 576 / 50p.
- « 16:9 » est sélectionnable lorsque le signal d'entrée est NTSC, PAL, 480 / 60i, 480 / 60p, 576 / 50i ou 576 / 50p.
- « 4:3 » et « 1:1 » fonctionnent uniquement en mode PIP ou POP. « V Fit » fonctionne uniquement en mode POP. Cette fonction n'est pas compatible avec l'affichage sur un écran simple.

● Distant

Configurez les réglages relatifs à une fonction distante (une fonction utilisée pour contrôler ce produit à partir de périphériques externes connectés au connecteur RS232C ou GPI).

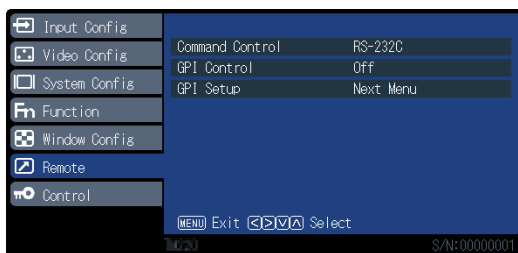

Contrôle de commande

Réglage	Description
RS-232C	Règle l'état Oui / Non de la télécommande via le connecteur RS-232C.
Non	

Contrôle GPI

Réglage	Description
Oui	Règle l'état Oui / Non de la télécommande via le connecteur GPI.
Non	

Paramétrage GPI

Définit les fonctions attribuées à chaque broche des connecteurs GPI (GPI1 à GPI8).

Réglage	Description
PIP	Bascule entre le double écran (P in P) et l'écran simple.
POP	Bascule entre le double écran (P out P) et l'écran simple.
Orientation	Pivote ou renverse l'écran.
Orientation \bar{M}	Pivote ou renverse l'écran principal
Orientation \bar{S}	Pivote ou renverse l'écran secondaire.
Mode fenêtr.	Change successivement entre les valeurs de réglage de « Config. fenêtr. » - « Mode fenêtr. ».
Entrée VIDEO \bar{M}	Commute le signal d'entrée de l'écran principal sur VIDEO.
Entrée S VIDEO \bar{M}	Commute le signal d'entrée de l'écran principal sur S VIDEO.
Entrée RGB/YP _B PR \bar{M}	Commute le signal d'entrée de l'écran principal sur RGB/YP _B PR.
Entrée DVI-D 1 \bar{M}	Commute le signal d'entrée de l'écran principal sur DVI-D 1.
Entrée DVI-D 2 \bar{M}	Commute le signal d'entrée de l'écran principal sur DVI-D 2.
Entrée SDI \bar{M}	Commute le signal d'entrée de l'écran principal sur SDI.
Entrée VIDEO \bar{S}	Commute le signal d'entrée de l'écran secondaire sur VIDEO.
Entrée S VIDEO \bar{S}	Commute le signal d'entrée de l'écran secondaire sur S VIDEO.
Entrée RGB/YP _B PR \bar{S}	Commute le signal d'entrée de l'écran secondaire sur RGB/YP _B PR
Entrée DVI-D 1 \bar{S}	Commute le signal d'entrée de l'écran secondaire sur DVI-D 1.
Entrée DVI-D 2 \bar{S}	Commute le signal d'entrée de l'écran secondaire sur DVI-D 2.
Entrée SDI \bar{S}	Commute le signal d'entrée de l'écran secondaire sur SDI.
Sélect. sync. RGB	Change successivement les valeurs de réglage sur « Config. entrée » - « Sélect. sync. RGB ».
Voyant rouge	Règle ● (rouge) affiché en haut au centre de l'écran sur Oui ou Non.
Voyant vert	Règle ● (vert) affiché en haut au centre de l'écran sur Oui ou Non.
WINDOW SELECT	Commute l'écran exécutant l'opération
Non déf.	Non défini.

Remarques

- Le GPI est une opération finale, à l'exception de « Voyant rouge » et « Voyant vert ». Réglez le potentiel des broches à partir d'ouvert au même potentiel que GND pour traiter les opérations. Les opérations finales nécessitent une période d'au moins 200 ms au même potentiel que GND. Après l'opération, annulez l'équipotentialité avec GND.

● Contrôle

Réglages des fonctions de verrouillage.



Fonction	Plage de réglage	Description
Verrouillage	Oui Non	Empêche toute modification des réglages via le menu principal.

Attention



- Lorsque cette fonction est réglée sur « Oui », aucun réglage autre que « Contrôle » ne peut être modifié.

Remarques

- Si vous maintenez enfoncés **[MENU]** et **[ENTER]** pendant environ quatre secondes, les boutons sont verrouillés et le message « VERROUILLÉ » s'affiche. Si vous effectuez de nouveau la même opération, les boutons sont déverrouillés et le message « DÉVERROUILLÉ » s'affiche.

Chapitre 3 Dépannage

3-1. Aucune image affichée

Problème	Cause possible et solution
1. Aucune image	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.• Vérifiez si les connecteurs DC OUT et DC IN sont correctement branchés.• Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.• Vérifiez si le témoin de fonctionnement principal de l'adaptateur CA est allumé.• Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
2. Le message ci-dessous apparaît sur l'écran bleu.	Ce message s'affiche lorsque le signal n'entre pas correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.
<ul style="list-style-type: none">• Ce message s'affiche si aucun signal n'entre. Exemple : 	<ul style="list-style-type: none">• Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains périphériques à brancher n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension.• Vérifiez si le périphérique à brancher est sous tension.• Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.• Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
<ul style="list-style-type: none">• Le message indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquence spécifiée. Exemple : 	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le périphérique à brancher est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical.• Redémarrez le périphérique à brancher.

3-2. Problèmes d'image

Problème	Cause possible et solution
1. L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none">Utilisez les fonctions « Luminosité » ou « Rétroéclairage » dans le menu Réglage pour régler ce problème.
2. Le texte est flou	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions compatibles » dans la Notice d'instruction).
3. Des images rémanentes s'affichent	<ul style="list-style-type: none">Les images rémanentes sont un problème propre aux moniteurs LCD. Évitez d'afficher la même image pendant trop longtemps.Utilisez l'économiseur d'écran ou la fonction Veille pour éviter d'afficher la même image pendant une période prolongée.Une image rémanente apparaît même après une courte période en fonction de l'image affichée. Si cela se produit, changer l'image ou éteindre l'appareil pendant quelques heures peut résoudre le problème.
4. Des points verts, rouges, bleus, blancs ou des points sombres restent affichés sur l'écran	<ul style="list-style-type: none">Il s'agit d'une caractéristique de la dalle LCD et non d'un dysfonctionnement.

3-3. Autres problèmes

Problème	Cause possible et solution
1. Le menu Réglage ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la fonction de verrouillage n'est pas réglée sur « Oui ». (Voir « Contrôle » (page 18))

Chapitre 4 Référence

4-1. Principaux réglages par défaut

PRESET / USINE


	Config. fenêt.	Sélect. entrée	
	Multi-fenêtres	Écran principal	Écran secondaire
PRESET 1	Non	SDI	DVI-D 1
PRESET 2	Non	DVI-D 2	SDI
PRESET 3	Non	RGB/YP _B P _R	VIDEO
PRESET 4	2POP	SDI	DVI-D 1
PRESET 5	2POP	DVI-D 1	SDI
USINE	Non	DVI-D 1	SDI

Autres Fonctions

Configuration du système	Langue	English
	Affichage logo	Oui
Fonctions	F1	Sélect. Gamma
	F2	Taillebalayage
	F3	POP
	F4	PIP
	F5	Orientation
Réglage des commandes	Verrouillage	Non


4-2. Spécifications des broches

● Connecteur GPI

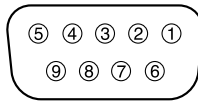


N° de broche	Nom du signal
1	GPI1
2	GPI2
3	GPI3
4	GPI4
5	GND
6	GPI5
7	GPI6
8	GPI7
9	GPI8

● Connecteur DC IN

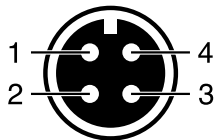

N° de broche	Nom du signal
1	GND
2	GND
3	24 VCC
4	24 VCC

● Connecteur DC OUT sur l'unité principale

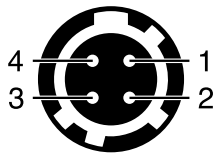


N° de broche	Nom du signal
1	GND
2	NC (aucune connexion)
3	NC (aucune connexion)
4	5 VCC

HIROSE P/N : HR10A-7R-4S(74)

Fiche recommandée

HIROSE P/N : HR10A-7P-4P(74)

● Connecteur DC OUT de l'adaptateur secteur

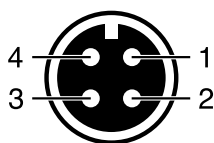

N° de broche	Nom du signal
1	GND
2	GND
3	24 VCC
4	24 VCC

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de détenir ou conserver toutes les pièces (en excluant les pièces de conception) du produit à l'expiration de cinq (5) années après que la production du Produit se soit arrêtée. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité. Si l'unité ne peut pas être réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une pièce adéquate, EIZO et ses Distributeurs peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur ;
- (d) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;
- (e) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;
- (f) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.) ;
- (g) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD ;
- (h) Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit où il pourrait être affecté par de fortes vibrations ou chocs ;
- (i) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles, et
- (j) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.).

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

Marque commerciale

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le logo DisplayPort Compliance et VESA sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.

Le logo SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.



DICOM est la marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour les publications de ses normes liées à la communication numérique d'informations médicales.

Kensington et Microsaver sont des marques déposées d'ACCO Brands Corporation.

Thunderbolt est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh et ColorSync sont des marques déposées d'Apple Inc.

EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor et ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i • Sound, Quick Color Match, RadiLight, Re/Vue, Screen Administrator, Screen InStyle et UniColor Pro sont des marques déposées d'EIZO Corporation.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Licence

La police bitmap utilisée pour ce produit a été créée par Ricoh Industrial Solutions Inc.

